



FILTER TECHNOLOGY

SEGRE F31000

MASQUE FFP3

ENTIEREMENT REGLABLE

LE SEGRE F31000 EST UN MASQUE FFP3 CONFORTABLE ET REUTILISABLE, AVEC UNE BARETTE NASALE ET DES SANGLES POUR UN AJUSTEMENT OPTIMAL.

DESCRIPTIF PRODUIT:

RÉFÉRENCE: F31000

CONDITIONNEMENT: Produit en sachet individuel, 15 pièces par BOITE, 10 boîtes par CARTON.



PROTECTION

NIVEAU DE FILTRATION DES PARTICULES > 99%

EFFICACITÉ DE FILTRATION BACTÉRIENNE (BFE) > 99,9%

RÉSISTANT AUX FLUIDES





FILTER TECHNOLOGY

SEGRE F31000

MASQUE FFP3

ENTIEREMENT REGLABLE

GVS FFP3 CERTIFIÉ CONFORME EN149:2001 + A1:2009 : FFP3 R D
EN 14683:2019, Annex C and ASTM F2100-19

QUE CELA SIGNIFIE?

IL Y A TROIS CLASSES DE MASQUE FILTRANT - FFP1, FFP2 ET FFP3. LE SEGRE F31000 SE TROUVE DANS LA CLASSIFICATION LA PLUS ÉLEVÉE POUR UN MASQUE - FFP3. POUR ATTEINDRE CETTE CLASSIFICATION, DES TESTS SONT EFFECTUÉS SUR LE MASQUE POUR MESURER SON EFFICACITÉ DE FILTRATION ET LE NIVEAU MAXIMAL DE FUITE INTÉRIEURE. LE MASQUE EST ÉGALEMENT SOUMIS À DES TESTS DE RÉSISTANCE À LA RESPIRATION ET DE COMPATIBILITÉ CUTANÉE. TOUS LES MASQUES SEGRE SONT MARQUÉS CE ET CONFORMES A LA RÈGLEMENTATION SUR LES ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE (UE) 2016/425 (2018).

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES DU F31000

- ◆ L'EFFICACITÉ DU FILTRE EST SUPÉRIEUR À 99% POUR LES PARTICULES ET 99.9% POUR LA BFE
- ◆ CONCEPTION PLIABLE À PLAT : CONFORTABLE
- ◆ SANGLE RÉGLABLE POUR UN AJUSTEMENT INÉGALÉ
- ◆ BARETTE NASALE REMBOURRÉE POUR UN CONFORT AMÉLIORÉ
- ◆ PONT DE NEZ EN ALUMINIUM
- ◆ SANS SOUPE AFIN DE VOUS PROTÉGER ET CEUX QUI VOUS ENTOURENT
- ◆ EMBALLAGE INDIVIDUEL POUR ÉVITER LA CONTAMINATION CROISÉE
- ◆ RÉSISTANT AUX FLUIDES
- ◆ SANS LATEX
- ◆ FILTRE À MEMBRANE MÉCANIQUE EN PTFE
- ◆ PRÉ-FILTRE ÉLECTROSTATIQUE



FILTER TECHNOLOGY

SEGRE F31000
MASQUE FFP3
ENTIEREMENT REGLABLE

INFORMATIONS IMPORTANTES




Désinfectez vos mains avant de manipuler un masque



Vérifiez toujours que le masque ne présente pas de défaut avant de le mettre




Assurez-vous que vous êtes bien rasé lorsque vous portez un masque

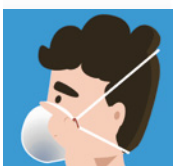

Ajustez les sangles uniformément en tournant l'élastique autour des clips des deux côtés



Appuyez en douceur sur le clip métallique de la barrette nasale pour obtenir un bon ajustement et pour éliminer les fuites éventuelles

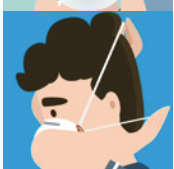

Vérifiez la pression du joint en appuyant le masque sur votre visage et en expirant - l'air ne doit s'échapper nulle part autour du masque

Lors du retrait du masque, utilisez uniquement les sangles et ne touchez pas le corps du masque

VISITEZ WWW.GVS.COM/MAG/ENG POUR PLUS D'INFORMATIONS